



Materac medyczny

**Puls Advanced
Tempo Advanced
Original Multi
Select Dynamic**

Producent:

Wizjo Sp. z o. o. al.

Wyzwolenia 2

35-501 Rzeszów

NIP 782 288 75 30

www.panmaterac.pl

Instrukcja używania
wersja 01

Spis treści

1. Informacje o wyrobie	3
1.1. Nazwa i klasyfikacja wyrobu	3
1.2. Inne wersje produktu	3
1.3. Przewidziane zastosowanie	3
1.4. Użytkownik	3
1.5. Charakterystyka działania wyrobu	3
1.6. Spodziewane korzyści kliniczne	4
1.7. Przeciwwskazania do użycia	4
1.8. Symbole i informacje umieszczone na etykiecie	4
1.9. Ostrzeżenia i informacje o środkach ostrożności	4
1.10. Kontakt z lekarzem	5
2. Kontakt z producentem	5
2.1. Zgłaszanie błędów i reklamacji	5
2.2. Opinie i sugestie	5

IFU_PM_01 2.2-1	Wersja instrukcji:	01
Produkt: materac medyczny	Obowiązuje od:	11.12.2025

1. Informacje o wyrobie

1.1. Nazwa i klasyfikacja wyrobu

Materac medyczny to wyrób medyczny i spełnia definicję wyrobu medycznego opisaną w bazie European Medical Device Nomenclature System (EMDN):

- **TEMPO ADVANCED, SELECT DYNAMIC** - Numer kodu EMDN: V080702: Non active anti-decubitus medical mattresses
- **PULS ADVANCED, ORIGINAL MULTI** - V0899: Medical support equipment – other
- Klasa wyrobu: I, Reguła 1

1.2. Inne wersje produktu

Modele materacy medycznych różnią się rozmiarami, aby można było je dobrać do potrzeb każdego użytkownika. Wszystkie rozmiary materacy występują w następujących rodzajach

(BASIC UDI: 59048245odleżynyDX):

- **TEMPO ADVANCED** 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 x 200 cm
- **SELECT DYNAMIC** 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 x 200 cm

(BASIC UDI: 59048245kregoslupHV):

- **PULS ADVANCED** 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 x 200 cm
- **ORIGINAL MULTI** 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 x 200 cm

Wszystkie parametry produktów można znaleźć na stronie www.panmaterac.pl

1.3. Przewidziane zastosowanie

Przewidywanym zastosowaniem wyrobu są:

- **TEMPO ADVANCED, SELECT DYNAMIC** przeciwdziałanie powstawaniu odleżyn
- **PULS ADVANCED, ORIGINAL MULTI** profilaktyka i wspomaganie leczenia bólów kręgosłupa

Materace dedykowane są do domowego zastosowania.

1.4. Użytkownik

Przewidywanymi użytkownikami są laicy, w szczególności:

- **TEMPO ADVANCED, SELECT DYNAMIC** - Dorośli z ograniczoną mobilnością narażeni na niskie i wysokie ryzyko powstawania odleżyn
- **PULS ADVANCED, ORIGINAL MULTI** - Dorośli cierpiący na nawracające bóle kręgosłupa

1.5. Charakterystyka działania wyrobu

Materac **TEMPO ADVANCED** to materac, którego wkład zbudowany został z kombinacji różnych rodzajów pianek o różnych właściwościach mechanicznych. Pianki HR tworzą podstawę konstrukcji, która zabezpiecza ciało przed nadmiernym zapadaniem się, a trzecia wierzchnia warstwa zbudowana jest z termoelastycznej pianki (Visco), która reaguje na temperaturę ciała i dopasowuje się do jego ułożenia, zapobiegając przede wszystkim ograniczeniu przepływu krwi i niedotlenienia tkanek i w konsekwencji powstawaniu odleżyn.

Materac **SELECT DYNAMIC** to materac, którego wierzchnią warstwę stanowi pianka Flofoam. Podstawę konstrukcji stanowią pianki wysokoelastyczne (HR). W środku materaca znajdują się sprężyny kieszeniowe, które wspomagają rozkładanie nacisku na większą powierzchnię ciała.

Materace medyczne **PULS ADVANCED, ORIGINAL MULTI** to materace sprężynowe o bardzo wysokiej elastyczności punktowej, uzyskanej dzięki niezależnej „pracy” pojedynczych sprężyn. Każda sprężyna jest umieszczona w materiałowej kieszeni dzięki temu indywidualnie reaguje na masę ciała. Warstwa pianki położona na sprężynach podnosi komfort spania oraz gwarantuje, że materace dopasowują się do indywidualnego kształtu ciała. Dzięki temu mięśnie odpoczywają, a kręgosłup jest utrzymywany w prawidłowym ułożeniu niezależnie od tego w jakiej pozycji śpi użytkownik.

IFU_PM_01 2.2-1	Wersja instrukcji:	01
Produkt: materac medyczny	Obowiązuje od:	11.12.2025

1.6. Spodziewane korzyści kliniczne

TEMPO ADVANCED, SELECT DYNAMIC - Zapobieganie powstawania odleżyn

PULS ADVANCED, ORIGINAL MULTI - profilaktyka i wspomaganie leczenia bólów kręgosłupa

1.7. Przeciwwskazania do użycia

Przeciwwskazania:

- **TEMPO ADVANCED, SELECT DYNAMIC** - Istniejące rany odleżynowe
- **PULS ADVANCED, ORIGINAL MULTI** - brak

1.8. Symbole i informacje umieszczone na etykiecie



1.9. Ostrzeżenia i informacje o środkach ostrożności

Wyroby przeznaczone są do stosowania zgodnie z ich przewidzianym zastosowaniem. Dodatkowo użytkownikowi sugeruje się konsultację z fizjoterapeutą lub z lekarzem w przypadku poważnych schorzeń.

TEMPO ADVANCED, SELECT DYNAMIC - U pacjentów z ryzykiem powstawania odleżyn należy pamiętać o konieczności zastosowania dodatkowych metod ograniczania ryzyka powstawania odleżyn, w tym: odpowiedniej pielęgnacji skóry, odciążenia tkanek zagrożonych powstawaniem odleżyn poprzez częstą zmianę pozycji i dobór odpowiednich akcesoriów (podkładów, poduszek) oraz właściwe odżywianie.

PULS ADVANCED, ORIGINAL MULTI - Przewlekły ból kręgosłupa wymaga konsultacji z lekarzem



ORIGINAL MULTI – zawiera w składzie latex.

Przed użyciem pamiętaj, aby:

- wyjąć wyrób z opakowania transportowego,
- wyjąć wyrób z opakowania jednostkowego,
- przeprowadzić kontrolę wzrokową stanu materaca, aby upewnić się, że materac nie nosi znamion uszkodzeń mechanicznych.

W przypadku zauważenia uszkodzenia mechanicznego materaca należy ten przypadek niezwłocznie zgłosić producentowi w celu wymiany lub reklamacji produktu. W takiej sytuacji nie należy korzystać z materaca.

Pokrowiec materaca **TEMPO ADVANCED, SELECT DYNAMIC, PULS ADVANCED, ORIGINAL MULTI** jest pokrowcem zdejmowalnym. W pokrowcu jest wszyty zamek, ułatwiający zdejmowanie. Pokrowiec należy prać w pralni z użyciem delikatnych detergentów, mając na uwadze, dedykowane temperatury prania. Nie wirować. Nie prasować. Nie chlorować. Warto przestrzegać tych wskazówek, aby poprzez niewłaściwą pielęgnację nie zniszczyć pokrowca materaca.

Dedykowane temperatury prania:

ORIGINAL MULTI – 60°C

TEMPO ADVANCED i PULS ADVANCED – 30°C

SELECT DYNAMIC – 30°C



- Prać wyłącznie w temperaturze do 60°C;



- Prać wyłącznie w temperaturze do 30°C;



- Nie prasować;



- Nie stosować wybielaczy i chloru;



- Nie suszyć w suszarkach w suszarni bębnowej;



- Nie czyścić chemicznie;

IFU_PM_01 2.2-1

Wersja instrukcji:

01

Produkt: materac medyczny

Obowiązuje od:

11.12.2025

1.10. Kontakt z lekarzem

Użytkownikowi sugeruje się konsultację z lekarzem lub fizjoterapeutą w razie jakichkolwiek wątpliwości. W każdej sytuacji, gdy istnieje podejrzenie stanu nagłego zagrożenia zdrowia użytkownika, należy przestać korzystać z produktu i niezwłocznie udać się po pomoc medyczną.

2. Kontakt z producentem

2.1. Zgłaszanie błędów i reklamacji

E-mail: salon@panmaterac.pl

Temat: Numer zamówienia

Zawartość:

- Opis problemu
- Numer seryjny produktu
- Dane kontaktowe

W przypadku problemów krytycznych – zgłoszenie, użytkownik powinien wysłać bezpośrednio Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pocztą elektroniczną (adres: incydenty@urpl.gov.pl), faksem (nr. 22 492 11 29), listem poleconym lub przesyłką kurierską (Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa).

2.2. Opinie i sugestie

Opinie i sugestie na temat nowych funkcji można przysyłać mailowo na adres: e-mail: salon@panmaterac.pl

IFU_PM_01 2.2-1	Wersja instrukcji:	01
Produkt: materac medyczny	Obowiązuje od:	11.12.2025